

Corona-Selbsttest Kurzanleitung


Einander verstehen – miteinander lernen
Geschwister-Scholl-Realschule
Schule des Gemeinsamen Lernens
Münster - Kinderhaus

Bitte eine **Wäscheklammer mit dem eigenen Namen** mit zu Schule bringen!

Vor dem Test die Hände waschen und evt. die Nase putzen und Fenster öffnen!

Dann werden alle benötigten **Testmaterialien** (Röhrchen mit Tropfkappe, Abstrichtupfer und Testkassette) an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben.

Erste Schritte

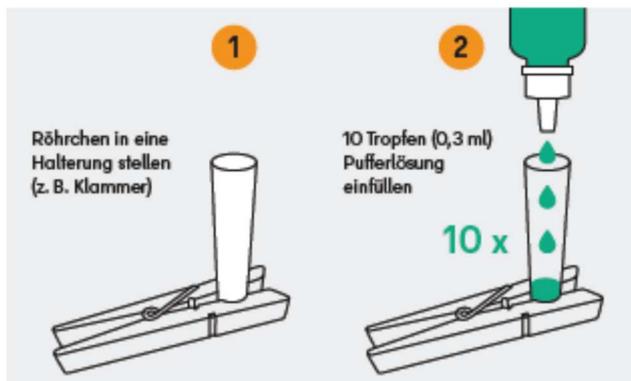

Die **Teströhrchen** werden mithilfe der **Wäscheklammern** aufgestellt und im Anschluss von der Lehrkraft mit **10 Tröpfchen** der **Pufferlösung** befüllt!

Dann wird der **Abstrichtupfer** aus der Verpackung genommen und alle Schülerinnen und Schüler führen die **Probennahme** (wie unten beschrieben) auf Zeichen der Lehrkraft hin durch: ca. **15 Sekunden pro Nasenloch**. Bitte hierzu den Kopf leicht in den Nacken legen.


(Achtung, fertig, los: „Maske ab!“)

Probennahme (bei Zimmertemperatur)



Im Anschluss wird sofort die **Maske wieder richtig aufgesetzt!**


Verantwortung für sich und andere übernehmen

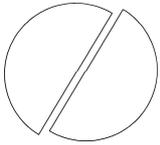

Corona-Selbsttest Kurzanleitung

Einander verstehen – miteinander lernen
Geschwister-Scholl-Realschule
Schule des Gemeinsamen Lernens
Münster - Kinderhaus

Behandlung der Probe

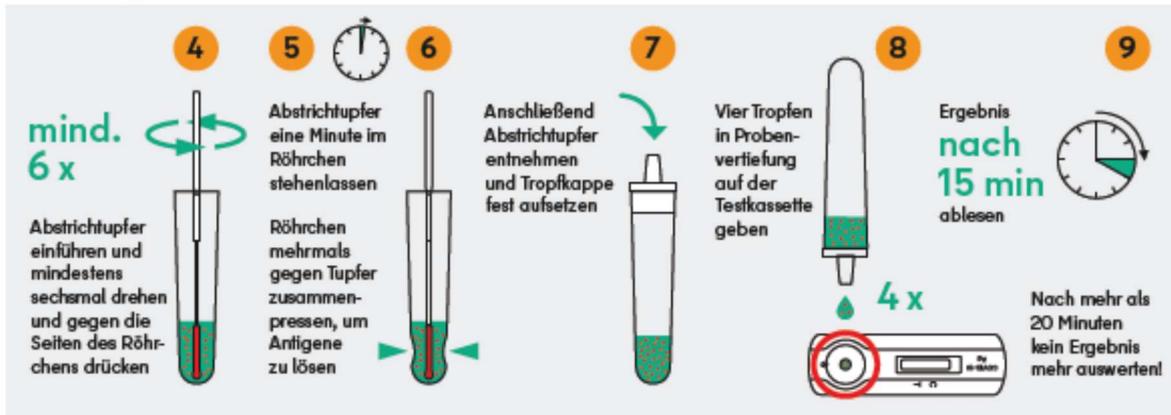

Nach der Probennahme wird der Abstrichtupfer in das Teströhrchen gestellt und mind. 6 Mal in dem Röhrchen gedreht und gegen die Seiten des Röhrchens gedrückt.



Eine Minute warten!

Auf ein Zeichen der Lehrkraft hin wird dann nach einer Minute die Tropfkappe auf das Röhrchen gesetzt und **4 Tropfen** auf das **runde Feld** auf der **Testkassette** aufgebracht.

Nun wird die Wäscheklammer (mit dem Namen) an die Testkassette geklemmt.

Die Lehrkraft sammelt die Testkassetten aller Schülerinnen und Schüler ein und die übrigen Materialien werden entsorgt. Die Lehrkraft startet einen Timer und liest nach 15 Minuten die Ergebnisse ab!

Nun kann der Unterricht beginnen! 😊



WÄSCHEKLAMMER NICHT VERGESSEN!

Verantwortung für sich und andere übernehmen